

PROCESO SIMPLIFICADO PARA UN 96% DE ÉXITO EN LA ADAPTACIÓN CON LENTES DE CONTACTO DE ALCON^{1,2*}



PASO 1: Selección del Lente Inicial

- Utilice la receta (Rx) para anteojos más reciente del paciente para comenzar la adaptación del lente multifocal de Alcon o para readaptar un material diferente al multifocal de Alcon.
- Para determinar el lente inicial, mida el equivalente esférico y distancia al vértice de la Rx de anteojos y adicione +0.25D en cada ojo.
Tomando la adición de anteojos, seleccione la adición inicial (LO, MED, HI) usando el cuadro de la derecha.

SELECCIÓN DE ADD	
ADD EN ANTEOJOS	AMBOS OJOS
Hasta +1.25D	LO
+1.50D a +2.00D	MED
+2.25D a +2.50D	HI

PERMITA QUE PASEN DE **5 a 10** MINUTOS de exposición al mundo real (fuera del consultorio) antes de evaluar el desempeño visual



PASO 2: Sobre-subjetivo de lejos

- Con ambos ojos abiertos, utilice lentes sueltos para realizar sobre-subjetivo de lejos en cada ojo por separado, agregando positivo en pasos de 0.25D hasta que el paciente reporte una disminución de la visión lejana.
- Si el paciente aceptó algo de sobre-subjetivo, cambie los lentes, sumando el sobre-subjetivo al poder de lejos del lente inicial de prueba (No cambie la adición).
- Revise la visión con ambos ojos abiertos usando objetos cotidianos.
Si la visión es funcional, entregue lentes de prueba para una evaluación del mundo real de 3 a 5 días.

TIPS DE ADAPTACIÓN

Pídale al paciente que enfoque objetos cotidianos de lejos para ofrecerle una manera real de evaluar sus lentes.



LEJOS

Pídale al paciente que mire objetos al otro lado de la calle



CERCA


Pídale al paciente que lea algo en su celular



*Con 2 o menos lentes por ojo, en la visita inicial de adaptación.

LENTES MULTIFOCALES DE ALCON

Un mismo diseño óptico.³ Un solo proceso de adaptación.
Dos lentes para cualquier estilo de vida.

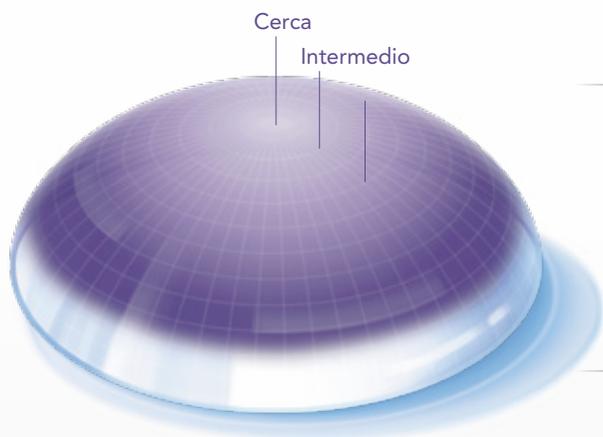

EL DISEÑO PRECISION PROFILE™³

Trabaja con la función pupilar natural de los ojos para permitir una visión clara e impecable a cualquier distancia.



La única lente de contacto multifocal de reemplazo mensual con Matriz de Humectación HydraGlyde® para una mayor humectación de la superficie de la lente.^{5**}

IDEAL PARA PRÉSBITAS QUIENES	Desean lograr una visión clara y comodidad de manera consistente durante todo el período de uso Desean usar lentes de reemplazo mensual de gran valor
MATERIAL	nelfilcon A
DISEÑO ÓPTICO	PRECISION PROFILE™ ³
RANGO DE PODERES (DIOPTRÍAS)	+6.00 a -10.00 (Pasos 0.25)
ADICIONES (ADD)	LO, MED, HI
MATERIAL	LOTRAFILCON B
DK, DK/T	110, 138 @3.00
SUPERFICIE	TRATAMIENTO PERMANENTE DE PLASMA.
MODALIDAD DE USO	USO DIARIO Y HASTA 6 NOCHES DE USO EXTENDIDO.
REEMPLAZO RECOMENDADO	MENSUAL

Recomiende los lentes de contacto multifocales de Alcon que se adaptan a las necesidades individuales de sus pacientes.

**Basado en pruebas in vitro de humectabilidad en lentes esféricas, en comparación con AIR OPTIX AQUA, Acuvue Oasys[®], Acuvue Vita[®], Ultra[®], Biofinity[®], p <0.01.

Referencias: 1. Bauman E, Lemp J, Kern J. Material Effect on Multifocal Contact Lens Fitting of Lenses of the Same Optical Design with the Same Fitting Guide. Poster presented at the British Contact Lens Association (BCLA) Clinical Conference and Exhibition; June 9-11, 2017; Liverpool, UK. 2. Alcon data on file, 2017. 3. Alcon data on file, 2016. 4. Alcon data on file, 2013. 5. Tucker R, Lemp J, Guillon M. In vitro and on eye wettability of lotrafilcon B lenses packaged with a substantive wetting agent. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017;58(8):3070.

Leer el manual de usuario y/o DFU antes de usar el producto, en especial consultar contraindicaciones, advertencias y precauciones. Consulte a su especialista de la salud visual.
(C) 2020 Alcon Inc 08/2020 Exp. 08/2022

CL-AHM-2000003

Alcon